

Inbetriebnahme | Kurzanleitung



1. Befestigungsvorrichtung
2. Rotes Signal-Licht
3. Grünes Signal-Licht
4. "Notruf abbrechen"-Taste
5. Notruftaste
6. USB-Anschluss
7. Lautsprecher & Mikrofon
8. USB-Anschluss für Netzadapter
9. Ladekontakte

Pflege des Geräts

Sie können das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen. Verzichten Sie bitte auf alkoholische Desinfektions- und Reinigungsmittel, da diese dem Gerät Schaden zufügen können.

Wasserabweisend und staubdicht nach IP67

Das libifyDoro kann beim Duschen und Baden normal verwendet werden. Das libifyDoro ist nicht wasser- und sollte nicht bei Tauchgängen mitgeführt werden.

Sturzsensord

Der Sturzsensord löst nach einem Sturz automatisch einen Notruf aus, sofern das Gerät 30 Sekunden nicht bewegt wurde. Als Hinweis, dass das Gerät einen Notruf absetzt, piept das Gerät 30 Sekunden lang alle 2 Sekunden. Wird in diesem Zeitraum der Notruf nicht abgebrochen, wird der Notruf ausgelöst.

Signal-Licht

Bedeutung

Mobilgerät: Grünes Licht blinkt alle 3 Sekunden - Gerät in Ladestation

Akku lädt

Mobilgerät: Grünes Licht blinkt alle 3 Sekunden - Gerät außerhalb Ladestation

Normalbetrieb

Mobilgerät: Grünes Licht leuchtet durchgehend - Gerät in Ladestation

Akku voll geladen

Mobilgerät: Rotes Licht blinkt alle 3 Sekunden

Batterie fast leer - neu laden

Mobilgerät: Rotes Licht blinkt 2-mal alle 3 Sekunden

Netzwerkstörung

Ladestation: Grünes Licht leuchtet durchgehend

Ladestation mit Strom verbunden



Aufbauen und Anschließen

Schließen Sie den Netzadapter (Logo auf Kabel oben) über den USB-Anschluss Ihrer Ladestation an und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose (grünes Signal-Licht). Das tragbare Notrufgerät schaltet sich automatisch ein, sobald es in die Ladestation gestellt wird. Es wird empfohlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch etwa 5 Stunden vollständig aufzuladen.



Testanruf durchführen

Nehmen Sie das aufgeladene Mobilgerät für den Test für ca. 20 Minuten mit nach draußen. Testen Sie das Notrufgerät auch innerhalb Ihres Zuhauses.

Drücken Sie die Notruftaste an Ihrem Mobilgerät entweder für **3 Sekunden** oder drücken Sie die Notruftaste **3 Mal schnell hintereinander**, um den Notruf auszulösen. Das Mobilgerät verbindet sich mit der Notrufzentrale. Es wird eine Sprechverbindung aufgebaut. Teilen Sie der Zentrale mit, dass es sich um einen **Testnotruf** handelt. Wiederholen Sie den Testanruf einmal im Monat, um sicherzustellen, dass Ihr libifyDoro-Notruf betriebsbereit ist.



Laden

Achten Sie darauf, dass Ihr Mobilgerät immer geladen ist. Zum Laden stellen Sie das Mobilgerät einfach in die Ladestation. Dabei sollte das Logo auf dem Mobilgerät als auch auf der Ladestation nach vorne ausgerichtet sein.

Während des Ladevorgangs blinkt das grüne Signal-Licht alle 3 Sekunden auf. Ist das Gerät geladen, leuchtet das grüne Signal-Licht durchgehend.



Befestigung der Kordel

Zur Befestigung der Kordel ziehen Sie die dünne untere Schlaufe der Kordel bis zum Anschlag durch die Befestigungsvorrichtung oben am Mobilgerät. Bringen Sie dann das schwarze Plastikverbindungsteil durch die Schlaufe und ziehen Sie diese fest. Falls noch nicht geschehen, können Sie dann die lange Kordel über die beiden Verbindungsteile verknüpfen. Hiermit können Sie das Mobilteil bei Bedarf auch um den Hals tragen.



Notruf auslösen: Zuhause, im Garten & unterwegs

Tragen Sie das aufgeladene Mobilteil wann immer Sie möchten bei sich – zum Beispiel im Bad, bei der Gartenarbeit oder unterwegs in Deutschland. Drücken Sie die Notruftaste für 3 Sekunden oder dreimal schnell hintereinander, um einen Notruf abzusetzen. Die Notrufzentrale setzt sich mit Ihnen über den Lautsprecher in Verbindung. Teilen Sie der Notrufzentrale mit, um welchen Notfall es sich handelt, damit schnell die passende Hilfe organisiert werden kann. Sollten Sie nicht in der Lage sein, mit der Notrufzentrale zu sprechen, wird diese sofort den Rettungsdienst zu Ihrem Standort schicken.



Notruf abbrechen

Sollten Sie den Notruf versehentlich ausgelöst haben und keinen Testanruf durchführen wollen, können Sie den Notruf abbrechen, indem Sie die „Alarm beenden“-Taste (Symbol: Telefonhörer) auf der rechten Seite des Mobilgeräts drücken.